

Surfalkan SH[®]

DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES LISTO PARA USAR

Diseñado para realizar limpieza y desinfección de manera rápida y en una sola aplicación en superficies de alto contacto, elevadas y estructurales, mobiliario, conexiones, circuitos de medios hospitalarios y odontológicos.

BENEFICIOS

- Inicio de acción inmediato, efecto bactericida, virucida, fungicida y esporicida.
- La acción potente y rápida de **Surfalkan SH[®]** se basa en la combinación de agentes limpiadores humectantes y activos antimicrobianos que desprenden las manchas y desinfectan rápidamente las superficies tratadas en cualquier rutina de limpieza y desinfección a nivel hospitalario y odontológico.
- Su formulación genera en la aplicación una espuma ligera no adhesiva que permite un mejor manejo en el área de limpieza.
- Limpia y desinfecta las superficies sin deteriorar los materiales. Ligero olor a pomelo.
- **Surfalkan SH[®]** presenta actividad esporicida sobre *Clostridium difficile*.
- Rendimiento total de 1.000 aplicaciones.

COMPOSICIÓN

Alcohol Etilico + Cloruro de Alquilbencildimetilamonio (Amonio cuaternario de quinta generación).

CERTIFICACIÓN SANITARIA INVIMA No. 2019035663.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Utilice los productos para la limpieza y desinfección con precaución.
2. No usar para el lavado de instrumental o de dispositivos médicos.
3. Consulte la hoja de seguridad en www.alkamedica.com

SEGURIDAD DEL PRODUCTO



No tóxico. No irritante.
No sensibilizante.
No contiene sustancias
alergénicas.



No corrosivo.
No mancha.
Sin EDTA y sin NTA.



Utilizar elementos de
protección personal.



Uso hospitalario.



Producto **amigable con el ambiente**.
Producto **biodegradable**.



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Presentación en frasco de 750 mL con aspersor.

INSTRUCCIONES DE USO Ver al respaldo.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

ACTIVIDAD EN	ENSAYO	MICROORGANISMO	TIEMPO DE CONTACTO
BACTERIAS	EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>	30 SEGUNDOS
	EN 13697	<i>Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>	5 MINUTOS
MICOBACTERIAS	AOAC 955.15	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1 MINUTO
HONGOS	EN 1650	<i>Candida albicans</i>	1 MINUTO
	EN 13697	<i>Candida albicans</i>	1 MINUTO
	AOAC 955.15	<i>Candida auris CDCB11903</i>	ACCIÓN INMEDIATA
		<i>Aspergillus brasiliensis ATCC16404</i>	ACCIÓN INMEDIATA
VIRUS	EN 14476	<i>Norovirus, Rotavirus</i>	5 MINUTOS
	EUCAST 2011	<i>Morbillivirus (ATCC CCL - 34), Paramyxoviridae (0.05%)</i>	5 MINUTOS
	CLSI 2012	<i>Parvovirus (ATCC VR - 2209), Parvoviridae (0.05%)</i>	5 MINUTOS
ESPORAS	EN 13704	<i>Clostridium difficile</i>	5 MINUTOS

ALKAMEDICA[®] S.A.S. REPRESENTANTE EXCLUSIVO Y ÚNICO IMPORTADOR PARA COLOMBIA DE ALKAPHARM FRANCIA.

☎ Manizales: (+57) (6) 874 3838 - (+57) (6) 874 3815

☎ (+57) 318 783 9998

✉ servicioalcliente@alkamedica.com

📍 Parque Industrial Juanchito, Terraza 6 - Bodega B / Manizales - Colombia.


www.alkamedica.com



ALKAMEDICA[®]

Soluciones Avanzadas en Control de Infecciones

Surfalkan SH[®] | INSTRUCCIONES DE USO

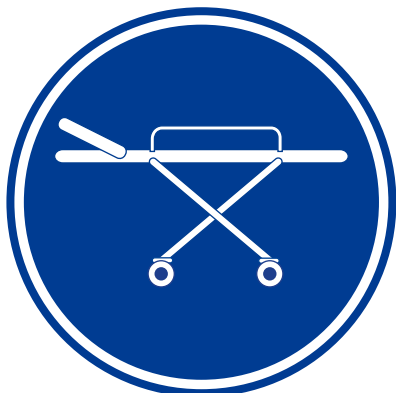

1.

Asegúrese que la superficie a limpiar y desinfectar se encuentre libre de sobreacumulación de polvo o materia orgánica.



2.

Aplice el producto directamente sobre toda la zona que desea limpiar y desinfectar.



3.

Distribuya uniformemente con un paño no tejido respetando la técnica de limpieza y deje secar.



4.

Deje actuar el producto sobre la superficie donde fue aplicado. Tiempo de contacto total de 5 minutos.



5.

No enjuague ni retire el producto. La superficie quedará libre de microorganismos patógenos.