

exeol OPA

Desinfectante de alto nivel

- Solución lista para usar a base de ortoftaldehído para la desinfección final por inmersión de dispositivos médicos termosensibles reutilizables, semicríticos y críticos, invasivos y no invasivos previamente limpiados.



INSTRUMENTOS
ENDOSCOPIA


Antes de usar, comprobar la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

exeol OPA puede utilizarse durante un máximo de 14 días.


Controlar regularmente la validez del baño con las tiras de control exeol strips OPA.

Antes de usar **exeol OPA** realizar una limpieza previa o una limpieza mecánica completa, y un aclarado intermedio de los dispositivos médicos que se van a tratar.


Utilizar guantes de manga larga.

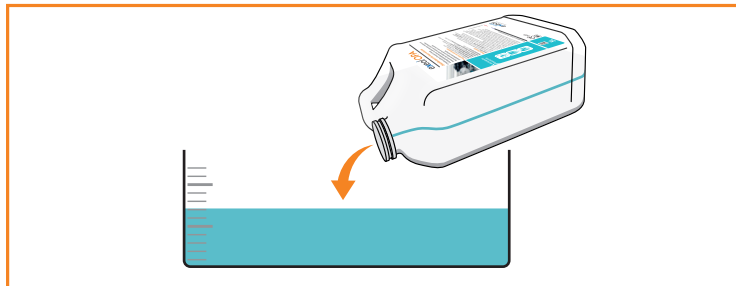


- 1 Cuando se use por primera vez, retirar el anillo de inviolabilidad y luego desenroscar el tapón. Desenroscar el tapón del bidón y transvasar el contenido a la bandeja. Volver a cerrar el bidón después de su uso.

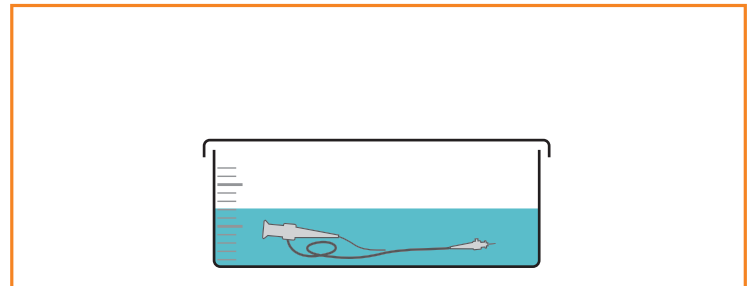


- 2 Colocar los dispositivos médicos abiertos y desmontados en la solución y asegurarse de que estén totalmente sumergidos. Asegurar la irrigación de los canales si están presentes. Cubrir la bandeja.

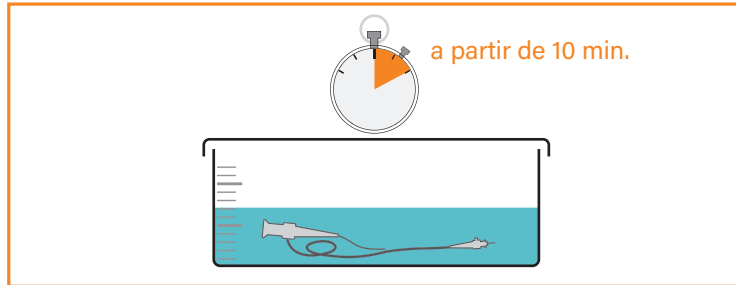

- 3 Tiempo de contacto: a partir de 10 min., según el espectro de actividad deseado.

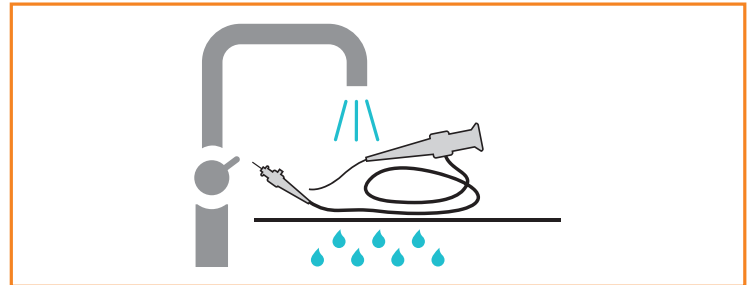

- 4 Aclarar cuidadosamente con agua estéril o filtrada (0,2 µm) antes de volver a utilizarlo.

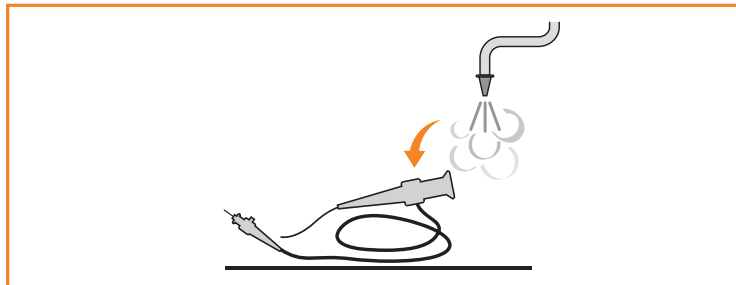

- 5 Antes de almacenar, secar los dispositivos mediante aire médico sobre una superficie seca limpiada previamente.

- CONFORME**
Rosa uniforme
(de manera ocasional pueden observarse pequeñas manchas blancas)
- NO CONFORME**
Rosa con manchas blancas

1. Sumergir la tira de control **exeol strips OPA** durante 1 segundo en **exeol OPA**.
2. Sacudir ligeramente la tira de inmediato para eliminar el exceso de líquido.
3. Exactamente 60 segundos después de la extracción de **exeol OPA**, observar el color del área de prueba y compararlo con la imagen de referencia de arriba.
Nunca se debe interpretar el color antes de 60 segundos (1 minuto) después de la extracción. La tira **exeol strips OPA** es sensible y específica al 100 %, siempre que se cumplan las instrucciones de uso.

Leer siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

SOLO PARA USAR PROFESIONAL

FABRICADO EN FRANCIA

SANTÉ
exeol

UNA DIVISIÓN DE SODEL



Archivo del producto disponible en www.exeol.fr

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

Marcado CE obtenido en 2023
DM de clase IIb

CE 0459

